

410

EXPERTOS

en estética

EDICIÓN



DIGITAL

ENTREVISTAS

**Sabrina Navarro
y Montse Pibernat,**
con experiencia y sin tapujos

MARKETING

Anuncios en redes sociales
e identidad visual:
¿estás haciéndolo bien?

TÉCNICAS

Tratamiento miofascial:
nuevo aliado de la
estética avanzada

www.expertosenestetica.es



• Protocolo •

TRATAMIENTO PARA UN GLOW PRIMAVERAL

Para Ana P. **Lostao**, la radiofrecuencia HERA de novasonix y los electrodos Ultimate Lifting Pack son el dúo perfecto para lograr un efecto *lifting* inmediato, redefinir el óvalo facial y potenciar la luminosidad de la piel. La experta nos comparte su protocolo para conseguir ese efecto "buena cara" cuando más se necesita.

Con novasonix

En plena temporada de eventos, los tratamientos faciales toman el protagonismo, y la tecnología se convierte en la gran aliada de los resultados inmediatos. Cuando las pieles buscan lucir su mejor versión, Ana P. **Lostao**, reconocida profesional del sector, elige la radiofrecuencia HERA de novasonix junto a sus electrodos Ultimate Lifting Pack como tecnología de referencia, pues potencia los efectos antiedad visibles desde la primera sesión (o incluso en una única visita).



Radiofrecuencia versátil

Ana Puelles **Lostao** tomó el relevo de una historia familiar de excelencia en el mundo de la estética, siguiendo el legado y las enseñanzas de su madre, Isabel **Lostao**. Actualmente dirige Estética **Lostao**, en Zaragoza, con una visión única, que combina la tradición heredada con las técnicas más novedosas, ofreciendo tratamientos personalizados y siempre a la vanguardia. Su gran conocimiento técnico, su sensibilidad estética y su compromiso con la innovación son los motivos por los que novasonix decidió nombrar a **Lostao** embajadora de su firma, una colaboración que no solo avala su trayectoria, sino que también la posiciona como una voz experta en el uso de aparatología estética de última generación.

Esta búsqueda constante de tecnologías eficaces, versátiles y respetuosas con la fisiología de la piel es la que justifica la apuesta de la esteticista por HERA. **Este equipo permite trabajar en distintos planos del rostro gracias a sus diferentes tipos de emisión:** capacitiva y resistiva monopolar, resistiva bipolar, así como su exclusiva tecnología HEBEGY, que combina *vacuum* con radiofrecuencia resis-

tiva monopolar. Esta versatilidad permite adaptar cada tratamiento a las necesidades específicas de la piel. "HERA me permite tratar de forma precisa y efectiva tanto el tejido profundo como las capas más superficiales, gracias a sus diferentes modos de trabajo", explica la propia **Lostao**.

Además, destaca que este tipo de tecnología se adapta perfectamente a su filosofía de trabajo: "Busco siempre **resultados naturales, visibles y seguros**. La clave está en respetar el rostro, entender su morfología y acompañarlo, y HERA me da las herramientas para conseguirlo", afirma.

Aunque cada tratamiento en Estética **Lostao** está diseñado para adaptarse a las necesidades individuales de cada rostro, hemos pedido a Ana Puelles que comparta con *Expertos en Estética* un protocolo especial para el momento en el que se publica este número; es decir: en plena primavera y temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones). Su secreto es añadir al tratamiento con radiofrecuencia los electrodos Ultimate Lifting Pack, que le permiten "conseguir ese **efecto tensor y glow tan buscado por mis clientas en estas fechas**", explica la experta.





Expertos en Estética



Paso a paso en cabina

1 La sesión comienza con una limpieza profunda de la piel, fundamental para eliminar impurezas y preparar la superficie cutánea. Este primer paso garantiza una mayor eficacia en la penetración de la radiofrecuencia y optimiza los resultados.

2 A continuación, se aplica el **Active Booster Firming de The Beauty Method**, un concentrado de activos que prepara la piel desde el interior, aportando firmeza y nutrición y estimulando la síntesis de colágeno. Este *booster* actúa como un potenciador biológico que maximiza los efectos del tratamiento posterior.

3 Después, aplicamos cuidadosamente la **Enriched Conductive Cream**, una crema conductora especialmente formulada para trabajar con la aparatología de radiofrecuencia. Su textura rica y su composición favorecen la transmisión de la energía, protegiendo la piel y asegurando una experiencia cómoda, eficaz y respetuosa con la fisiología cutánea.

4 Con la piel perfectamente acondicionada, la profesional selecciona el modo de emisión más adecuado entre las diferentes opciones que ofrece HERA (capacitiva y resistiva monopolar, resistiva bipolar o HEBEGY –vacuum con radiofrecuencia resistiva monopolar–) en función de sus objetivos.

5 Durante la aplicación, se emplean los electrodos **Ultimate Lifting Pack**, diseñados para potenciar el efecto tensor. Estos electrodos actúan de forma precisa sobre puntos estratégicos del rostro, activando la microcirculación, favoreciendo el drenaje y estimulando la producción de fibras de colágeno y elastina. La piel se alisa progresivamente, gana densidad y muestra una luminosidad saludable y natural.

El tratamiento se realiza en un entorno cálido y relajante; y la sensación de calor producida por la radiofrecuencia no solo es agradable, sino que ayuda a relajar los músculos faciales, mejorar la oxigenación de los tejidos y potenciar el bienestar general. Silvia del Amo, técnica facialista del equipo de **Lostao**, confirma este *feedback* por parte de los clientes: **"El resultado es inmediato y sorprendente: la piel se ve más luminosa, firme y revitalizada"**. Los clientes salen encantados, no solo por el efecto visible en su rostro, sino también por la experiencia sensorial y el cuidado personalizado que reciben durante cada sesión".



Escanéame
y mira el testimonio completo aquí:

